












Made in Germany

## Gebrauchshinweise Ritex Schutzhüllen für Ultraschallsonden

Ritex Schutzhüllen für Ultraschallsonden sind für den medizinischen Einsatz bei Verwendung von Vaginal- und Rektalsonographiesonden geeignet und dienen der Verringerung des Risikos von Infektionsübertragungen.

- Farbe: transparent
- Oberflächenstruktur: glatte Oberfläche
- Form: zylindrisch
- Material: Naturkautschuklatex
- Beschichtung: trocken, gepudert
- Zustand: nicht steril
- Einzeln elektronisch geprüft
- Verfügbare Packungsgrößen: 200 Schutzhüllen
- Verfügbare Größen: Ø 34 mm x 200 mm; Ø 28 mm x 200 mm

	Medizinprodukt
	Hergestellt aus Naturkautschuklatex. Kann bei Latex-Allergikern allergische Reaktionen einschließlich eines anaphylaktischen Schocks hervorrufen und darf von diesen deshalb nicht benutzt werden.
	Im verschlossenen Karton, kühl und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.
	Trocken lagern.
	Nicht zweimal verwenden, da ansonsten das Risiko einer Infektionsübertragung besteht.
	Nummer der Charge.
	Verfalldatum
	Hersteller
	CE-Zeichen
	Keine öl- oder fetthaltigen Gleitmittel verwenden (z. B. Vaseline, Körperlotion etc.). Beachten Sie die Produktbeschreibung des Ultraschallgels.
	Entsorgung: Über den Hausmüll entsorgen.
	Meldehinweis: Schwerwiegende Vorkommnisse bei Verwendung des Produktes der zuständigen Behörde (Sitz des Anwenders/ Patienten) melden.
	Geprüft in Anlehnung an EN ISO 4074.